


DR PEN A6 Instrukcja Obsługi



WSTĘP

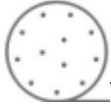



NAZWY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA



bateria 1



bateria 2



ładowarka



pokrywka na wtyczkę

Do mezoterapii mikroigłowej:



9 igieł



12 igieł



36 igieł



42 igły



Nano igły

Do makijażu permanentnego:



1 igła



3 igły



5 igieł



7 igieł



INSTRUKCJA OBSŁUGI

TRYB BATERII

Jak wymienić baterię:



1



2

1. odkręć pokrywę wtyczki (zdjęcie 1)
2. wymień baterię (zdjęcie 2)

Jak ładować baterię:



3



4

1. włóż baterię do ładowarki (zdjęcie 3)
2. Podłącz zasilacz do gniazda, a następnie podłącz do kontaktu (zdjęcie 4) ładowarka:



- Lampa Kontrolka
- świeci n as ładowania
 - kolor zielony oznacza pełne naładowanie

TRYB ADAPTERA

1. Zamontuj pokrywę wtyczki. (zdjęcie 5)

2. Podłącz zasilacz do gniazda (rysunek 6)
3. Podłącz zasilacz do kontaktu




5



6

JAK ZAINSTALOWAĆ KARTRIDŻE

1. Wyjmij wkłady z igłą ze sterylnego opakowania.
2. Dopasuj okrągłe sloty numer 1 do slotu numer 2 urządzenia oraz włóż kartridże igłowe poziomo do samego końca.
3. Zablokuj kartridż, obracając go w lewo.
4. Regulacja długości igły powinna być wykonana po włączeniu urządzenia.
5. Jeśli chcesz wyjąć wkład z igłą, przekręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wypchnij poziomo, dopasowując do siebie okrągłe szczeliny (slot1. slot2).

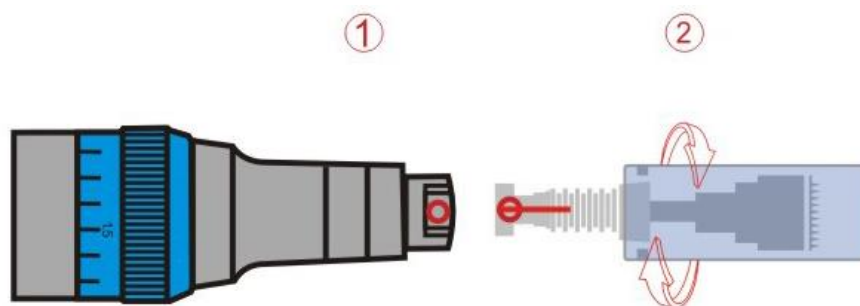

REGULACJA DŁUGOŚCI IGŁY

Można dostosować długość igły, obracając pierścień regulacyjny w prawo lub w lewo. Obracając go w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, igły będą dłuższe. Obrócenie go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - igły będą krótsze.

Punkt regulacji długości igły:



REGULACJA PRĘDKOŚCI I DŁUGOŚCI IGŁY

1. Regulacja prędkości i ON / OFF



KONTROLA POZIOMU PRĘDKOŚCI – 5 POZIOMÓW

Naciśnięcie przełącznika i przytrzymanie w ciągu 2 sekund, powoduje włączenie urządzenia. Urządzenie startuje od najniższej prędkości do najwyższej prędkości po włączeniu. Prędkość od niskiej do wysokiej. Naciśnij przycisk i przytrzymaj w ciągu 2 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

Jeśli szybkość migotania kontrolki jest większa, wówczas i prędkość będzie wyższa.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Urządzenie

Urządzenie do mikronakłuwania dzięki wibracjom.

2. Wykonanie

Urządzenie do nakłuwania, powodujące penetracje w skórę środków lub preparatów, wykorzystywanych przez zabiegowców, za pomocą mikroigły poruszającą się między pozycjami wysuniętymi i cofniętymi.

3. Specyfikacja

- a. Nazwa produktu: Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej
- b. Nazwa Modelu: Ultima A6
- c. Adapter: 5V,1000mA
- d. Waga: 62g
- e. Rozmiar: 126*23(mm)

4. Zawartość opakowania

Urządzenie:	1 szt
Bateria:	2 szt
Adapter :	1 szt
Ładowarka:	1 szt
Kartridże:	2 szt / 12 igieł
Instrukcja:	1 szt



SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

1. Zasady ogólne

- Trzymaj z wyłączonym zasilaniem. Wycieraj powierzchnię suchą szmatką.
- Trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej temperatury, wilgotności.
- Nie zlecaj pomiaru, naprawy lub zamiany urządzenia nieprofesjonalnym serwisom.

2. Rutynowa kontrola

- Przed użyciem sprawdź urządzenie i adapter.
- Kiedy korzystasz z urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, sprawdź, czy działa prawidłowo.










3. Przeczytaj instrukcję przed użyciem i korzystaj zgodnie z opisem.



PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU

1. Osoby, które są w trakcie choroby, posiadają stan zapalny lub zwiększone krwawienie.
2. Osoby, które mają alergię i hemofilię
3. Osoby, które mają melanozę na twarzy
4. Gorączka
5. Osoby w trakcie leczenia, lub posiadające chroniczne choroby.
6. Osoby w trakcie leczenia zażywające leki.
7. Nie stosuj u osób poniżej 12 roku życia.

UWAGI

-  Nie używaj go przy mocy innej niż 220V AC.
Może to spowodować pożar lub awarię
-  Nie używać w pobliżu miejsca o wysokiej temperaturze, wilgotności powietrza (blisko nawilżacza). Może to spowodować nieprawidłowe działanie
-  Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie zmieniaj sterownika, może to spowodować uszkodzenie
-  Nie dotykaj urządzenia ani nie odłączaj przewodów zasilających mokrymi rękami, może to spowodować porażenie prądem.
-  Nie używaj uszkodzonego kabla ładowania.
Może to spowodować pożar (pamiętaj, aby zastąpić go innym).
-  Nie używaj podpiętego przewodu, który ma pęknięcie. Może spowodować powstanie blizny na skórze.
-  Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka
-  Upewnij się, że przeprowadziłeś testowe korzystanie z urządzenia. Jeśli są jakieś znalezione problemy - zleć naprawę.
-  Nikt inny niż zabiegowiec nie może korzystać z urządzenia. Może to spowodować wypadki lub awarię.