




venome®

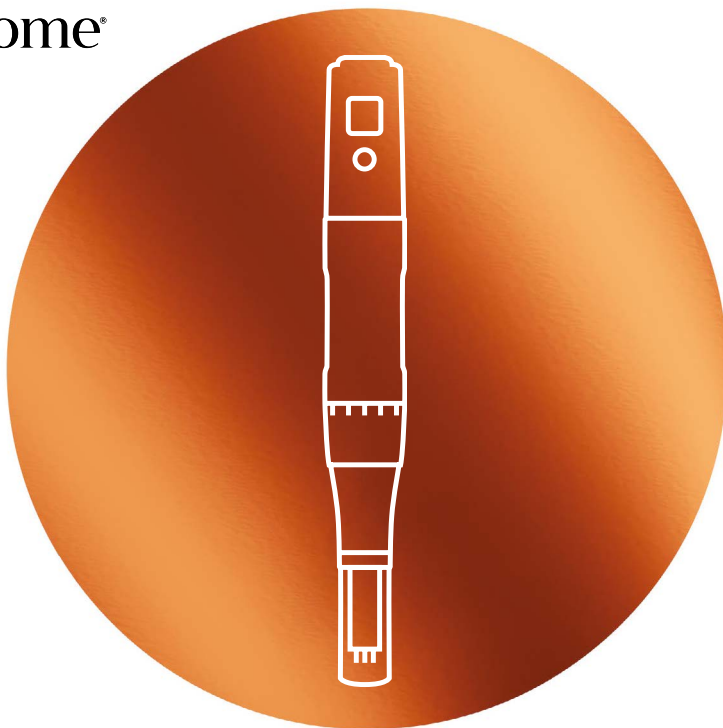

VENOME PEN

URZĄDZENIE DO MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

Jedna ze skuteczniejszych metod do silnej stymulacji i rewitalizacji skóry, polegająca na kontrolowanej mikroperforacji naskórka bez ryzyka uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Największą zaletą mezoterapii mikroigłowej jest możliwość kontrolowania intensywności i głębokości zabiegu w ten sam sposób, na całej płaszczyźnie poddawanej terapii. Ten rodzaj zabiegu jest idealnym uzupełnieniem zabiegów mezoterapii igłowej, potęgując efekt finalny.



MECHANIZM DZIAŁANIA MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ

Kontrolowane mikrouszkodzenia skóry poprzez jej celowe nakłucie

Uwolnienie kropli krwi z naczyń zapoczątkowuje ciąg procesów aktywacji trombocytów

Trombocyty uwalniają czynniki wzrostu

Czynniki wzrostu intensyfikują i stymulują procesy przebudowy i całkowitego remodelingu, dzięki pobudzeniu produkcji kolagenu typu III

WSKAZANIA

Zmarszczki

Nierówna struktura skóry

Wiotkość

Przebarwienia

Nadmierna suchość

Rozstępny

Blizny

DŁUGOŚĆ IGŁY

0,20 - 0,49 mm

MECHANIZM DZIAŁANIA

Zwiększenie penetracji substancji czynnej

ZASTOSOWANIE

Wzmocnienie działania preparatów

0,50 - 0,90 mm

Zwiększenie wchłaniania substancji czynnej i pobudzenie produkcji kolagenu

Pigmentacja, drobne zmarszczki, wypadanie włosów

1,00 - 2,50 mm

Zwiększenie przenikania substancji czynnej i naturalna indukcja kolagenu

Zmarszczki, blizny, trądzik, zmiany pigmentacyjne, lifting, wyrównanie tekstury

VENOME PEN

Venome Pen to urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów mezoterapii mikroigłowej, z wykorzystaniem odpowiednio dobranych kartridży i regulacją głębokości perforacji skóry.

Zakres wysuwu igieł: 0.25-2.5 mm

Szybkość nakłuwania: 22 000 nakłuć na minutę

Bezprzewodowy czas pracy do 8 godzin

Dostępne kartridże to 11, 24 i 36 PIN

Venome Pen znakomicie sprawdzi się w walce z zmarszczkami, bliznami potrądzikowymi, przebarwieniami, czy też rozstępami. Urządzenie może pracować w trybie przewodowym jak i bezprzewodowym, dzięki temu oferuje wielką elastyczność w pracy.

JAK DZIAŁA VENOME PEN?

Mikro-nakłuwanie stymuluje naturalne procesy wytwarzania kolagenu i elastyny w skórze, co sprawia że skóra staje się jędrna i sprężysta. Dzięki wykonywanym nakłuciom substancje odżywcze z produktu trafiają w głębsze partie skóry, skutecznie ją odżywiają.

ZALETY STOSOWANIA MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ Z WYKORZYSTANIEM VENOME PEN

Krótki czas zabiegu

Precyzja zabiegu

Kontrola głębokości iniekcji

Możliwość wykonania większej ilości nakłuć

Intensywna stymulacja skóry na tych samych poziomach

ZALETY VENOME PEN

Wysoka szybkość nakłuwania do **22 000 nakłuć** na minutę

Wyświetlacz LCD wskazujący aktualny tryb pracy (1-6)

Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium

Możliwość pracy w trybie przewodowym i bezprzewodowym

Stabilny 3-stopniowy zaczep kartridży

ZESTAW ZAWIERA

- Urządzenie Venome Pen
- 2 szt. Akumulatorów litowo-jonowych (500 mah)
- Moduł do pracy przewodowej
- Ładowarka
- Zasilacz + kabel
- Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim

Produkt przeznaczony do stosowania przez profesjonalistę.