




venome®

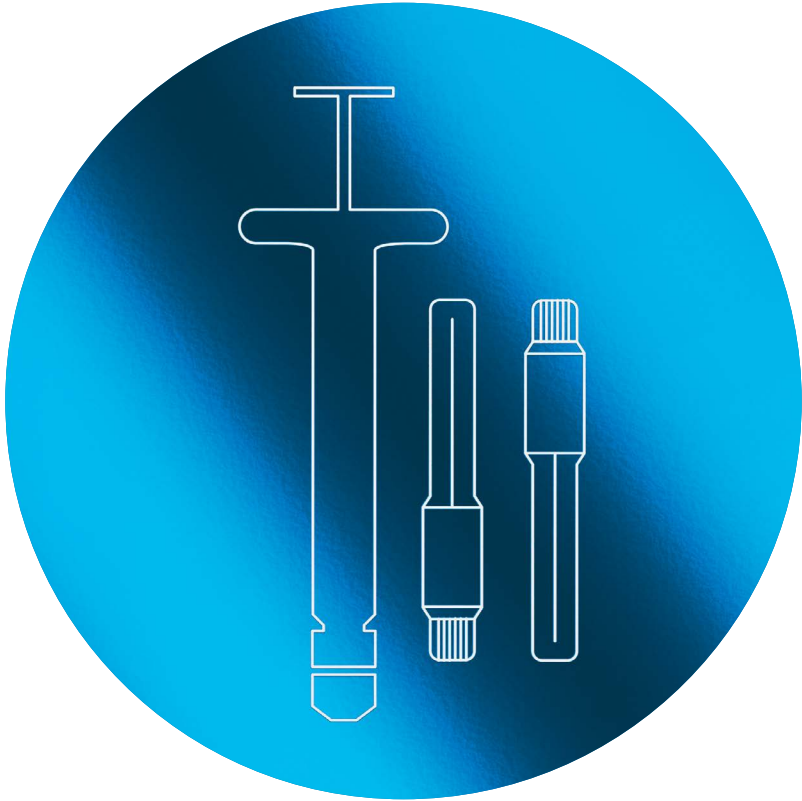

VENOME FILLER

Professional use only

VENOME FILLER

Venome Filler to **gama sześciu wypełniaczy tkankowych opartych na monofazowym, biofermentacyjnym żelu usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego**. Różnorodność produktów Venome charakteryzujących się odmienną ilością hialuronianu sodu oraz czynnika sieciującego pozwala precyzyjnie dobrać preparat w zależności od wskazania i zakresu pożądanej korekty.

Wypełniacze Venome są odpowiednie zarówno do subtelnego nawilżenia i odżywienia skóry, iniekcji ust i uzupełnienia delikatnych lub średnich linii zmarszczek, jak i mocniejszego podkreślenia objętości i nadania odpowiedniego kształtu wybranym partiom twarzy.

Produkty z linii Venome Filler oparte zostały na **innowacyjnej technologii TOUCH**, która charakteryzuje się zastosowaniem w produkcji stabilizowanego kwasu hialuronowego o wysokiej masie cząsteczkowej i niewielkich odchyłach między rozmiarami oraz odpowiednio przygotowanego, fizjologicznego roztworu buforowego, który nawadnia formułę tworząc trójwymiarową sieć kwasu.


Wstępny proces technologiczny Venome Filler opiera się na **dwukrotnym oczyszczeniu składników bazowych** z resztek ścian komórkowych, dzięki czemu w badaniach kwas uzyskuje bardzo niski poziom protein i endotoksyn, co **minimalizuje ryzyko ewentualnych reakcji alergicznych**. Oczyszczony produkt jest następnie równomiernie rozmieszczany w całości mieszaniny.


Następnie **hialuronian sodu** zostaje poddany stabilizacji z użyciem czynnika sieciującego **BDDE**, w celu połączenia cząstek przez wiązania chemiczne spowalniające rozpad i nadające odpowiednią odporność na działanie naturalnie występującego w organizmie enzymu hialuronidazy. Nadmiar ewentualnie występującego BDDE usuwany jest w procesie wymywania, co znacząco wpływa na strukturę sieci i zmniejsza późniejsze, niechciane nadkorekcie.

Kolejnym etapem jest połączenie **formuły usieciowanej i fizjologicznego roztworu buforującego**, dzięki któremu tańcuchy stabilizowane zostają otoczone wodną powłoką, przez co nie wykazują nadmiernej absorpcji wody w trakcie i po iniekcji, redukując wielkość obrzęków.

Zastosowany **podwójny proces homogenizacji** pozwolił uzyskać idealnie gładki i spójny żel o wysokiej lepkości strukturalnej.


Gama Venome Filler dzięki **technologii TOUCH** cechuje się odpowiednią jednorodnością i elastycznością kwasu, dzięki czemu wzrasta komfort wykonywanej iniekcji. W pełni nawodniona formuła kwasu minimalizuje ryzyko opuchnięć, co ułatwia pracę nad docelowym kształtem i wielkością korekty i przyspiesza okres rekonwalescencji po zabiegu.

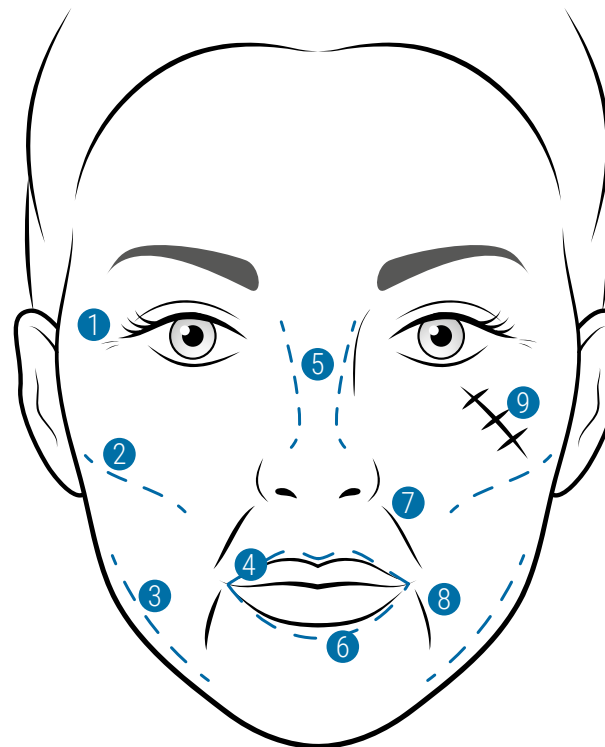

1 Drobne linie zmarszczek
VENOME FILLER S 
VENOME FILLER S


2 Kości policzkowe
VENOME FILLER L
VENOME FILLER XXL

3 Korekta zuchwy
VENOME FILLER L
VENOME FILLER XXL

4 Subtelne powiększenie ust
VENOME FILLER S 
VENOME FILLER S

5 Korekta nosa
VENOME FILLER L
VENOME FILLER XXL

6 Pełne usta
VENOME FILLER L 
VENOME FILLER M

7 Bruzdy nosowo-wargowe
VENOME FILLER S
VENOME FILLER M
VENOME FILLER L 
VENOME FILLER L

8 Linie marionetki
VENOME FILLER S


9 Blizny i ubytki
VENOME FILLER M
VENOME FILLER L
VENOME FILLER XXL

VENOME FILLER S

NAWILŻANIE UST I SUBTELNA KOREKTA CZERWIENI WARGOWEJ

WSKAZANIE

- Naturalne wypełnienie ust z uzyskaniem miękkiej struktury czerwieni wargowej
- Subtelne uwypuklenie konturu
- Korekta występujących delikatnych asymetrii
- Niwelowanie drobnych zmarszczek okolicy ust

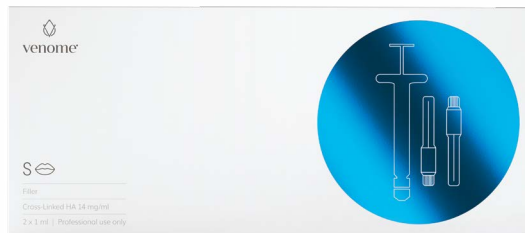

SKŁAD

Produkt zawiera **14 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego** w formie wiskoelastycznego żelu.

DZIAŁANIE

Venome Filler S Lips to biodegradowalny hialuronian sodu pochodzenia niezwierzęcego, przeznaczony do powierzchniowych iniekcji i subtelnych korekt oraz naturalnego wypełniania ust wraz z nawilżeniem czerwieni wargowej. Produkt charakteryzuje **w pełni nawodniona struktura**, co minimalizuje ryzyko opuchnięć pozabiegowych. W trakcie iniekcji ułatwia to również pracę nad uzyskaniem odpowiedniego kształtu ust i idealnie wyprofilowanego konturu, bez nadmiernego obrzęku podczas zabiegu. Po zastosowaniu preparatu Venome Filler S Lips usta uzyskują odpowiednią objętość, miękkość i gładką strukturę. Powierzchniowe linie zmarszczek są subtelnie wygładzone bez ryzyka nadkorekcji.

Efekt ten utrzymuje się **od 5 do 6 miesięcy**, jednak jest to zależne od zastosowanej techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.

STOSOWANIE

Iniekcja w błonę śluzową ust lub środkową warstwę tkanki.

Rekomendowany rozmiar igieł i kaniul:

- 27G
- 30G


Professional use only

VENOME FILLER S

NIWELOWANIE DROBNYCH I ŚREDNICH LINII ZMARSZCZEK

WSKAZANIE

- Redukcja powierzchniowych i średnio głębokich linii zmarszczek
- Spłycenie bruzd nosowo-wargowych
- Wypełnienie linii marionetki
- Modelowanie ust
- Uniesienie opadających kącików
- Odmłodzenie wierzchniej części dłoni

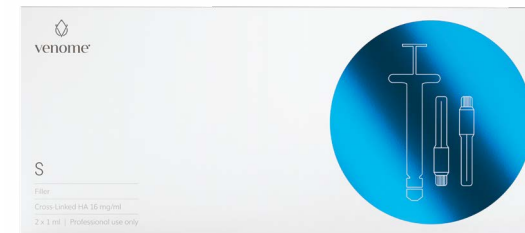

SKŁAD

Produkt zawiera **16 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego** w formie wiskoelastycznego żelu.

DZIAŁANIE

Wypełniacz tkankowy **Venome Filler S** to usieciowany żel kwasu hialuronowego przeznaczony do korekty powierzchniowych i średnich załamań skórnych. Dzięki **technologii sieciowania TOUCH** i uzyskaniu odpowiedniej elastyczności i jednorodności żelu, produkt jest łatwy do podania podczas iniekcji. Idealne właściwości plastyczne pozwalają również na odpowiednie rozmasowanie i tym samym ułożenie implantu w tkance, co daje naturalne efekty wypełnienia bez ryzyka przerysowania. **Nawodniona forma preparatu Venome Filler S** minimalizuje ryzyko opuchnięć pozabiegowych, dzięki czemu ogranicza się czas rekonwalescencji, a skóra szybciej uzyskuje pożądaną jędrność.

Efekt ten utrzymuje się **od 5 do 6 miesięcy**, jednak jest to zależne od zastosowanej techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.

STOSOWANIE

Iniekcja w błonę śluzową ust lub środkową warstwę tkanki.

Rekomendowany rozmiar igieł i kaniul:

- 27G
- 30G


venome-global.com

VENOME FILLER M

WYPEŁNIENIE ŚREDNICH I GŁĘBOKICH LINII ZMARSZCZEK ORAZ ZWIĘKSZENIE JĘDRNOŚCI I ELASTYCZNOŚCI TKANEK

WSKAZANIE

- Wypełnienie średnich i głębokich załamań skórnych
- Korekta linii marionetki
- Uzupelnienie delikatnych blizn
- Niwelowanie bruzd nosowo-wargowych
- Zwiększenie objętości warg

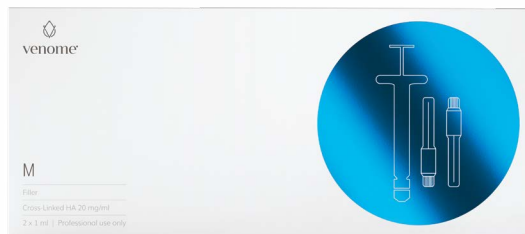

SKŁAD

Produkt zawiera **20 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego** w formie wiskoelastycznego żelu.

DZIAŁANIE

Wypełniacz **Venome Filler M** jest uniwersalnym produktem do całkowitej korekty średnich i spłykania głębokich linii zmarszczek i fałd nosowo-wargowych. **Monofazowy żel kwasu hialuronowego** dzięki w pełni nawodnionej formule i wyjątkowej **technologii sieciowania TOUCH** bardzo dobrze rozprowadza się w tkankach, nadając im w miejscu podania optymalną jędrność i natychmiastowe uwypuklenie załamań, bez nadmiernej opuchlizny, spowodowanej często zbyt **dużą higroskopijnością** cząstek kwasu. Produkt idealnie nadaje się jako uzupełnienie terapii z użyciem produktów Venome Filler S i L.

Efekt ten utrzymuje się **od 5 do 6 miesięcy**, jednak jest to zależne od zastosowanej techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.

STOSOWANIE

Iniekcja w błonę śluzową ust lub środkową i głęboką warstwę tkanki.

Rekomendowany rozmiar igieł i kaniul:

- 27G
- 30G


Professional use only

VENOME FILLER L

IDEALNIE WYPEŁNIONE USTA Z WYRAŹNYM ZARYSEM ŁUKU KUPIDYNA

WSKAZANIE

- Zwiększenie objętości ust
- Korekcja asymetrii górnej i dolnej wargi
- Podkreślenie łuku kupidyna
- Odmłodzenie okolicy ust
- Uniesienie opadających kącików
- Odmłodzenie wierzchniej części dłoni

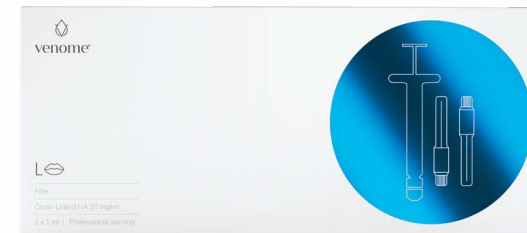

SKŁAD

Produkt zawiera **20 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego** w formie wiskoelastycznego żelu.

DZIAŁANIE

Usieciowany żel kwasu hialuronowego **Venome Filler L Lips** dzięki wyjątkowym właściwościom reologicznym znakomicie sprawdza się w zabiegu powiększania i modelowania ust. Preparat w postaci **jednorodnego i homogenicznego żelu** nadaje odpowiednią objętość, jędrność i nawilżenie przy jednoczesnym zachowaniu miękkości i naturalności. Dzięki lekko sprężystej strukturze i zastosowanej technologii nawodnienia formuły kwasu, wypełniacz skutecznie koryguje asymetrię górnej lub dolnej wargi, bez niechcianego, nienaturalnego efektu. **Venome Filler L Lips** idealnie sprawdza się przy wyborze techniki modelowania ust na płasko, dzięki czemu górna warga jest estetycznie wywinięta, łuk kupidyna subtelnie podkreślony, uzyskując tym samym efekt pełnych, zmysłowych ust.

Efekt ten utrzymuje się **od 5 do 6 miesięcy**, jednak jest to zależne od zastosowanej techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.

STOSOWANIE

Iniekcja w błonę śluzową ust lub środkową i głęboką warstwę tkanki.

Rekomendowany rozmiar igieł i kaniul:

- 27G
- 30G


venome-global.com

VENOME FILLER L

WOLUMETRIA TWARZY
– ZARYSOWANIE I PODKREŚLENIE NATURALNEGO PIĘKNA

WSKAZANIE

- Modelowanie kształtów twarzy
- Uwydatnienie kości policzkowych i żuchwy
- Korekta nosa
- Nivelowanie bruzd nosowo-wargowych
- Korekcja blizn lub ubytków tkankowych

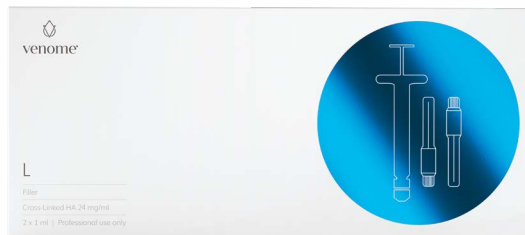

SKŁAD

Produkt zawiera **24 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego** w formie wiskoelastycznego żelu.

DZIAŁANIE

Wolumetryczny wypełniacz **Venome Filler L** to jednofazowy, spójny preparat przeznaczony do korekcji średnich lub głębokich zmarszczek. Zastosowana **technologia TOUCH** i odpowiednia gęstość sieciowania, pozwoliła uzyskać żel o doskonałej spójności, idealnie nadający się do naturalnej korekty utraconej wraz z wiekiem objętości policzków, które poprzez wiotkość skóry podkreślają głębokość bruzd nosowo-wargowych.

Venome Filler L skutecznie wypełni ubytki tkanki oraz podkreśli kontur twarzy, nadając jej pożądaną kształt.

Efekt ten utrzymuje się **od 6 do 9 miesięcy**, jednak jest to zależne od zastosowanej techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.

STOSOWANIE

Iniekcja w błonę śluzową ust lub środkową i głęboką warstwę tkanki.

Rekomendowany rozmiar igieł i kaniuli:

-27G

-30G

VENOME FILLER XXL

MOCNE UWYDATNIENIE KONTURÓW
I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW TKANKOWYCH

WSKAZANIE

- Zwiększenie objętości kości policzkowych i żuchwy
- Korekcja blizn i znaczących ubytków tkankowych
- Korekta nosa



SKŁAD

Produkt zawiera **28 mg/ml monofazowego, usieciowanego kwasu hialuronowego** w formie wiskoelastycznego żelu.

DZIAŁANIE

Usieciowany żel kwasu hialuronowego Venome Filler XXL dzięki odpowiedniej plastyczności i wyjątkowym właściwościom reologicznym idealnie sprawdza się do modelowania kształtów twarzy i korekty zdecydowanych ubytków tkankowych oraz blizn. Preparat w postaci jednorodnego i homogenicznego żelu nadaje odpowiednią objętość, jędrność przy jednoczesnym wysokim stopniu kohezji i miękkości korekty. Dzięki odpowiednio sprężystej strukturze i zastosowanej technologii nawodnienia formuły kwasu, wypełniacz skutecznie koryguje głębokie ubytki, zmniejszając ryzyko asymetrii i wielkość obrzęków pozabiegowych.




Efekt zabiegu utrzymuje się **od 8 do 10 miesięcy**, jednak jest to zależne od zastosowanej techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.

STOSOWANIE

Iniekcja w głęboką warstwę tkanki.

Rekomendowany rozmiar igieł i kaniuli:

-27G

PRODUKT/ PROBLEM	S 	S	M	L 	L	XXL
 SUBTELNE POWIĘKSZENIE UST	●	●				
 DROBNE LINIE ZMARSZCZEK	●	●				
 BRUZDY NOSOWO-WAR- GOWE		●	●	●	●	
 LINIE MARIONETKI		●				
 PEŁNE USTA			●	●		
 KOŚCI POLICZKOWE					●	●
 KOREKTA ŻUCHWY					●	●
 KOREKTA NOSA					●	●
 BLIZNY I UBYTKI			●		●	●
 DŁONIE		●	●		●	

Stosowanie Venome Filler nie jest wskazane w przypadku:

- uczulenia na kwas hialuronowy
- chorób o podłożu autoimmunologicznym lub podczas przebiegu immunoterapii
- stanu zapalnego skóry w planowanym miejscu iniekcji (np. trądziku)
- grypy i gorączki, ostrego przeziębienia
- ostrego zakażenia układowego (opryszczka, łuszczycyca)
- zaburzenia krzepnięcia krwi
- skłonności do powstawania blizn
- ciąży i karmienia piersią
- osób poniżej 18 roku życia

Produkty gamy Venome Filler nie mogą być wstrzykiwane w:

- naczynia krwionośne
- kości
- piersi

Nie zaleca się stosowania preparatu:

- przy zabiegach w okolicy oczodołowej oraz zmarszczek poprzecznych czoła.

Działania uboczne:

Po zabiegu mogą wystąpić reakcje w postaci zaczerwienienia (rumień) oraz obrzęku. W rzadkich przypadkach w miejscu iniekcji preparatu może pojawić się opuchlizna i odczuwalne swędzenie. Dzień po zabiegu może wystąpić wyraźny obrzęk, powinien on jednak zniknąć samoistnie po upływie 3-5 dni. Bardzo rzadko można zaobserwować reakcje alergiczne na działanie preparatu Venome Filler, gdyż jest on kwasem hialuronowym pochodzenia niezwierzęcego, przez co nie zawiera protein.

Rzadko w miejscu iniekcji produktu mogą wystąpić grudki lub obrzęki. W przypadku reakcji zapalnej zaleca się by pacjent udał się do lekarza. W literaturze dotyczącej wypełniaczy bazujących na kwasie hialuronowym, opisano odosobnione przypadki ziarniaków, ropni, opóźnionych reakcji nadwrażliwości oraz przebarwień. Co więcej, w literaturze zostały również odnotowane bardzo rzadkie przypadki martwicy spowodowanej iniekcją w żyłę tętniczą lub zamknięcie naczynia poprzez nacisk implantu na ścianę tętnicy.

ZALECENIA POZABIEGOWE

W CIĄGU 48 GODZIN PO ZABIEGU NALEŻY:

- ✓ pić dużo wody (ok. 2,5 l dziennie),
- ✓ utrzymywać miejsca iniekcji w szczególnej czystości (nie dotykać),
- ✓ ograniczyć kontakt ze zwierzętami (dotykanie, przytulanie),
- ✓ nie spać w pozycji na brzuchu,
- ✓ nie pić napojów alkoholowych i kofeinowych,
- ✓ nie palić tytoniu i papierosów,
- ✓ nie nakładać makijażu,
- ✓ zrezygnować z korzystania z sauny, basenu, gorących kąpiel, peelingów, depilacji, intensywnych ćwiczeń,
- ✓ nie nakładać na skórę preparatów o działaniu drażniącym,
- ✓ stosować kremy ochronne z filtrem UV min. SPF 50,
- ✓ stosować kremy silnie regenerujące, nawilżające,
- ✓ nie stosować innych zabiegów estetycznych na podrażnione miejsca.



venome®



office@venome-global.com



[@venomeofficial](https://www.facebook.com/venomeofficial)



www.venome-global.com