


REVITRANE

Wypełniacze tkankowe z usieciowanym kwasem hialuronowym

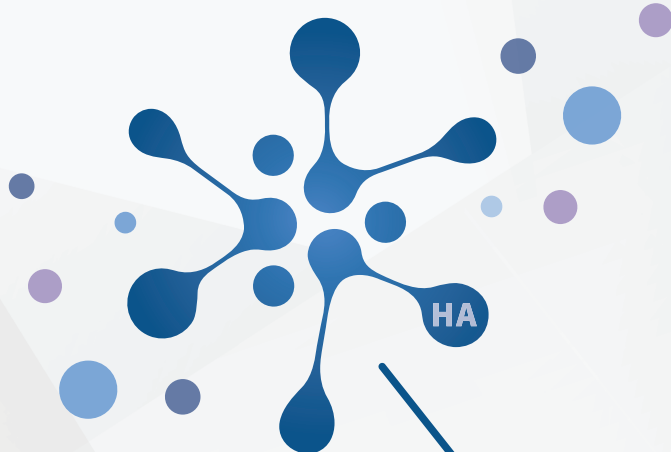

ERPHARM

Monofazowe wypełniacze tkankowe z certyfikatem medycznym koreańskiego laboratorium BR PHARM



Classic wypełnienie


Volume wypełnienie

Premium wypełnienie

Skinbooster rewitalizacja

REVITRANE maximum korzyści z zastosowania wypełniaczy z kwasem hialuronowym!


Jedne z bezpieczniejszych wypełniaczy tkankowych opartych o usieciowany kwas hialuronowy z minimalnym zastosowaniem czynnika sieciującego BDDE.

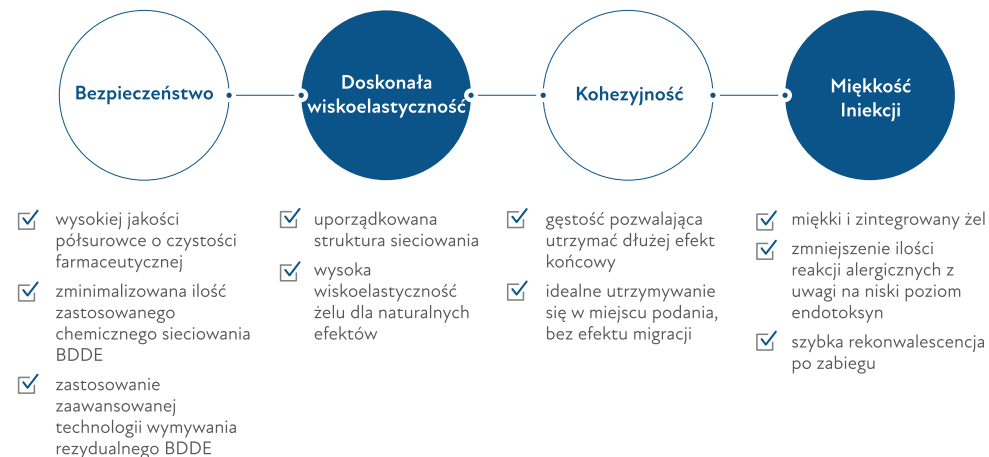

Wysoka jakość surowców – farmaceutyczna jakość kwasu hialuronowego



Wypełniacze Revitrane powstają z **wysokiej jakości surowców**. Zastosowany kwas hialuronowy został zaakceptowany przez FDA (Food and drugs administration from US) oraz EDQM (European Directorate for Quality of Medicines)

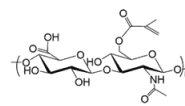

Kwas hialuronowy wypełniaczy Revitrane posiada **najniższą zawartość metali ciężkich** (mniej niż 10 ppm) co czyni go jednym z bezpieczniejszych produktów w swojej klasie. Międzynarodowe standardy FDA i EDQM to 20ppm.

Niski poziom protein i endotoksyn pozwala znacznie skrócić okres rekonwalescencji pacjenta.


	Marka A	Revitrane
Proteiny	Maksimum 0.3% lub 0.1%	Maksimum 0.1%
Endotoksyny	<0.5 lub 0.05 IU/mg	<0.04 IU/mg

Unikalny proces sieciowania

Unikalny proces sieciowania wypełniaczy **Revitrane** – metoda LED

Wydłużony czas sieciowania z zastosowaniem niskich temperatur

Niski poziom deformacji łańcuchów kwasu HA i zwiększony poziom fizycznego sieciowania

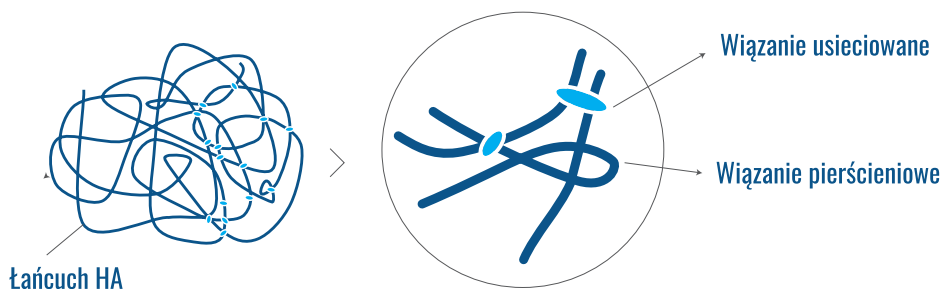

Wydłużony czas sieciowania z zastosowaniem niskich temperatur pozwala uzyskać niski poziom deformacji łańcuchów kwasu hialuronowego i zwiększyć poziom fizycznego sieciowania z obniżeniem ilości nieusieciowanych partii HA.

Wyjątkowa elastyczność żelu dzięki zastosowaniu technologii LED i innowacyjnej technologii obniżania czynnika sieciującego


Wypełniacze Revitrane to miękkie żele wypełniające, o odpowiednich masach cząstek w zakresie wskazania, co przyczynia się do optymalnej plastyczności i komfortu pacjenta podczas podania.

Wymywanie rezydualnego BDDE – dla lepszych efektów estetycznych

Innowacyjna technika oczyszczania kwasu hialuronowego pozwala utrzymać współczynnik sieciowania na poziomie niższym niż 5%, co wpływa na naturalny wygląd korekt.

Kolor wymytego BDDE


Produkt A Revitrane Premium

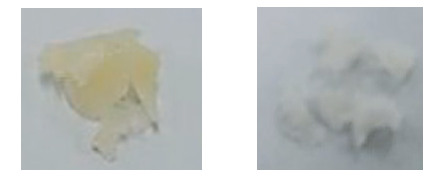

Wysoki poziom kohezji

Revitrane dzięki innowacyjnej technice produkcji zachowuje pierwotny kształt podania, minimalizując ryzyko migracji w momencie działania na tkankę oporu i ciśnienia.

Test dyfuzji tuszu dla Revitrane i marek A i B po 6 godzinach

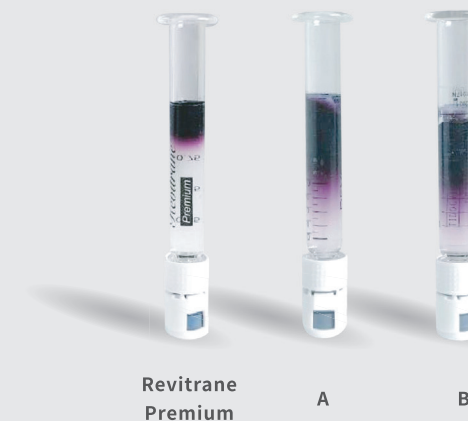

Revitrane Classic

Wypełniacz tkankowy **Revitrane Classic** to usieciowany żel kwasu hialuronowego przeznaczony do korekty ust, płytkich zmarszczek i okolicy oka.

Produkt posiada **20mg/ml kwasu hialuronowego** usieciowanego. Idealne właściwości plastyczne pozwalają również na odpowiednie rozmasowanie i tym samym ułożenie implantu w tkance, co daje naturalne efekty wypełnienia bez ryzyka nadkorekcji.

Efekt wypełnienia utrzymuje się do **7 miesięcy**, jednak jest to zależne od zastosowanej techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.



Opakowanie zawiera 1ml produktu.

Revitrane Premium

Wypełniacz tkankowy **Revitrane Premium** to usieciowany żel kwasu hialuronowego przeznaczony do korekty zmarszczek poprzecznych czoła, okolicy policzków, bruzd nosowo-wargowych i ogólnego konturowania twarzy. Produkt posiada **20mg/ml kwasu hialuronowego usieciowanego**.

Idealne właściwości plastyczne pozwalają również na odpowiednie rozmasowanie i tym samym ułożenie implantu w tkance, co daje naturalne efekty wypełnienia bez ryzyka nadkorekcji. Efekt wypełnienia utrzymuje się do **12 miesięcy**, jednak jest to zależne od zastosowanej techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.



Opakowanie zawiera 1ml produktu.

Revitrane Volume

Wypełniacz tkankowy **Revitrane Volume** to usieciowany żel kwasu hialuronowego przeznaczony do korekty linii marionetki i głębokich zmarszczek.

Produkt posiada **20mg/ml kwasu hialuronowego** usieciowanego. Idealne właściwości plastyczne pozwalają również na odpowiednie rozmasowanie i tym samym ułożenie implantu w tkance, co daje naturalne efekty wypełnienia bez ryzyka nadkorekcji.

Efekt wypełnienia utrzymuje się do **9 miesięcy**, jednak jest to zależne od zastosowanej techniki iniekcji oraz czynników biologicznych i środowiskowych.



Opakowanie zawiera 1ml produktu.

Revitrane HA20 Skin Booster

Delikatnie sieciowany żel kwasu hialuronowego do rewitalizacji głębokich partii skóry, dla zwiększenia elastyczności i podniesienia poziomu nawilżenia.

Produkt powoduje subtelne wypełnienie delikatnych zmarszczek, dając skórze odpowiedni poziom napięcia i uniesienie tkanek. Produkt może być stosowany do rewitalizacji dłoni, szyi i twarzy.

Efekt rewitalizacji utrzymuje się **około 2 miesięcy**.



Opakowanie zawiera 3 strzykawkę po 2ml.

Obszary zabiegowe



Działanie niepożądane



Po wstrzyknięciu tego produktu mogą wystąpić takie same wytwory, jak te związane ze wstrzykiwaniem. Reakcje te obejmują rumień, zaczerwienienie, ból, swędzenie, siniaki, zmiany w miejscu wstrzyknięcia. Zazwyczaj reakcje te ustępują samoistnie w ciągu 1-2 tygodni po wstrzyknięciu.



Częstotliwość występowania nietypowych reakcji, które po wprowadzeniu produktu na rynek zgłoszono w badaniu grupy produktów Revitrane wynosiła mniej, niż 1%. Reakcje te obejmują stan zapalny, obrzęk, ból, wrażliwość, opuchliznę, stwardnienie, krótkotrwałe objawy, rumień miejscowy i wędrujący oraz infekcje itp.



Zgłaszano rzadkie przypadki następujących zdarzeń niepożądanych: - Zmiany w postaci ropnia, siniaków, wysypki, blizn i teleangiektazji.







Zgłoszono objawy zapalenia, które mogą wystąpić miesiąc po zabiegu lub nawracać w miejscach wstrzyknięć. Ponieważ niewłaściwe leczenie zapalenia może prowadzić do powikłań, takich jak powstanie ropnia, w przypadku niewyjaśnionych reakcji zapalnych, należy wykluczyć infekcję lub ją leczyć jeśli tego wymaga.













Nie zaleca się terapii samym kortykosteroidem, którego nie można stosować razem z antybiotykiem. W przypadku pacjentów, u których wystąpiły poważne reakcje klinicznie, decyzja o ponownym leczeniu powinna uwzględniać przyczynę i znaczenie wcześniejszych reakcji.












Zdarzenia niepożądane należy zgłaszać specjalście lub producentowi/dealerowi.

Produkt	Opakowanie	Koncentracja HA	Typ żelu	Obszar zabiegowy
 HA20 Skinbooster	2.0mL x 3syr	20mg/mL	Lepkość █ █ █ Elastyczność █ █ █ Kohezynność █ █ █	Nawilżenie i rewitalizacja, zmarszczki zlokalizowane na twarzy i szyi
 Classic	1.0mL x 1syr 30G x 1/2" (13mm) 2 ea	20mg/mL	Lepkość █ █ █ Elastyczność █ █ █ Kohezynność █ █ █	Zmarszczki płytkie, usta, okolica oka
 Volume	1.0mL x 1syr 27G x 1/2" (13mm) 2 ea	20mg/mL	Lepkość █ █ █ Elastyczność █ █ █ Kohezynność █ █ █	Linie marionetki, głębokie zmarszczki, objętościowe usta
 Premium	1.0mL x 1syr 27G x 1/2" (13mm) 2 ea	20mg/mL	Lepkość █ █ █ Elastyczność █ █ █ Kohezynność █ █ █	Wolumetria brody i policzków, głębokie bruzdy nosowo-wargowe, korekta nosa

Inne ostrzeżenia

-  Ten produkt powinien być aplikowany przez operatora w pełni przeszkolonego w zakresie jego wykorzystywania.
-  Przed zabiegiem operator powinien w pełni wyjaśnić pacjentowi wskazania, przeciwwskazania i potencjalne skutki niepożądane.
-  Przed użyciem produktu należy sprawdzić stan strzykawek, czy nie są uszkodzone.
-  Trzeba sprawdzić datę przydatności na opakowaniu produktu.
-  Należy unikać stosowania w przypadku potencjalnej niedrożności naczyń krwionośnych (może to skutkować martwicą tkanek).
-  Ten produkt nie może być używany, dopóki infekcja i stan zapalny nie zostaną opanowane lub usunięte.
-  Wstrzyknięcie pacjentom, u których wystąpiła opryszczka lub zapalenie skóry, może spowodować nawrót opryszczki.
-  Nie ustalono bezpieczeństwa dla pacjentów, u których wystąpiły bliznowce, przebarwienia, blizny przerostowe.
-  Bezpieczeństwo i skuteczność przy długotrwałym stosowaniu, z wyjątkiem okresu określonego w badaniu klinicznym, nie zostały zweryfikowane.
-  Bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu powiększania ust nie zostały ustalone.

Przeciwwskazania

-  Pacjenta należy poinformować, aby przez kilka dni po zabiegu unikał masowania lub uciskania leczonego miejsca, aby uniknąć ryzyka przemieszczania się produktu.
-  Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.
-  Nie należy ponownie sterylizować Revitrane.
-  Nie wolno mieszać z innymi produktami przed wstrzyknięciem.
-  Nie stosować w miejscach, w których jest aktywna choroba, w jakich występuje stan zapalny, infekcja lub guz, albo w pobliżu obszaru wydzielonego do leczenia.
-  Nie używać produktu, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
-  Nie wstrzykiwać tego produktu w obszar, w którym znajduje się inny implant do wstrzykiwania, z wyjątkiem innych produktów Revitrane. Produktu Revitrane nie należy wstrzykiwać w obszar, w którym został umieszczony implant nie nadający się do wstrzykiwania.
-  Kobiety w ciąży i karmiące piersią.
-  Dzieci i młodzież.

REVITRANE

Wypełniacze tkankowe z usieciowanym kwasem hialuronowym



+48 690 020 021



www.dermatic.pl



kontakt@dermatic.pl