



venome®

DWUETAPOWA KURACJA NAPRAWCZA VENOME

STYMULACJA CEBULEK WRAZ Z ODBUDOWĄ I OCHRONĄ PASM WŁOSÓW

WSKAZANIA



OSŁABIONE MOSTKI
DWUSIARCZKOWE
WE WŁOSACH



CIENKIE I ŁAMLIWE
WŁOSY



WYPADANIE
ANDROGENOWE



WYPADANIE
WŁOSÓW ZWIĄZANE
ZE STRESEM LUB
PRZYJMOWANYMI
LEKAMI



OSŁABIONE WŁOSY
PO ZABIEGACH
FRYZJERSKICH

PRODUKTY



**VENOME HAIR
FILLER**



**VENOME HAIR
FILLER 2.0**

Dwuetapowy zabieg oparty na naprzemiennej kuracji **Venome Hair Filler** oraz **Venome Hair Filler 2.0**. Zastosowanie obu preparatów w terapii wpływa na intensywną stymulację cebulek, wzmocnienie trzonów włosów, uzupełnianie braków keratyny i wzmocnienie mostków dwusiarczkowych oraz utrzymanie jak najdłuższego efektu estetycznego zabiegu.


Venome Hair Filler zawiera innowacyjne połączenie kwasu hialuronowego oraz peptydów biomimetycznych odpowiedzialnych za pobudzenie aktywności i stymulacji podziałów komórkowych, dodatkowo przyspieszając mikrokrążenie w skądzie. Preparat dzięki swojej skoncentrowanej formule hamuje wypadanie włosów oraz aktywuje cebulki do wzrostu nowych trzonów.

Idealnym uzupełnieniem terapii jest zastosowanie **Venome Hair Filler 2.0**, który posiada ten sam kompleks peptydów, jednak jest wzbogacony o hydrolizowaną keratynę, która wzmacnia włosy od nasady. Preparat zawiera ekstrakt z wąkroty azjatyckiej poprawiający unaczynienie skóry głowy i tripeptyd miedziowy, który przyspiesza fazę wzrostu oraz dodatkowo zapobiega siwieniu włosów.

Po przeprowadzonej terapii trychologicznej włosy staną się **grubsze, gęstsze, odporne na uszkodzenia**, a skóra głowy **intensywnie nawilżona**.



● **VENOME HAIR FILLER**

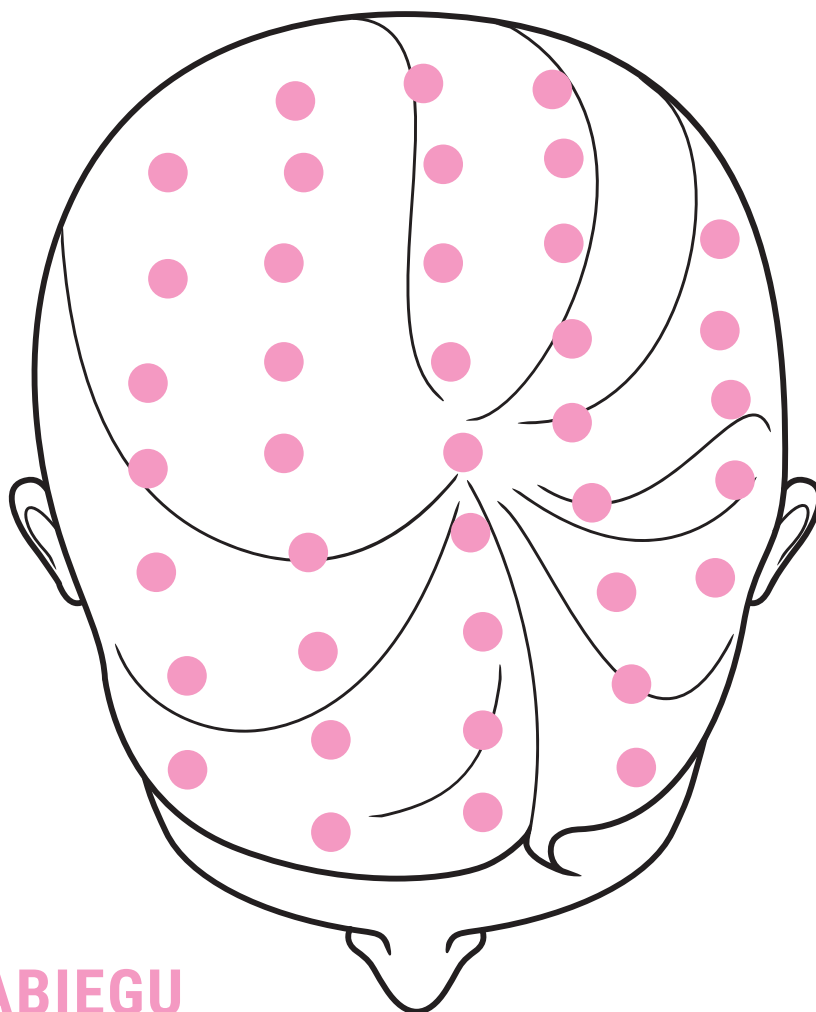

PRZEBIEG ZABIEGU

ETAP I. VENOME HAIR FILLER

1. **ZA POMOCĄ IGŁY POBRANIOWEJ** POBIERZ PRODUKT VENOME HAIR FILLER W ILOŚCI 2ML
2. **ZDEZYNFEKUJ** OBSZAR PODDAWANY ZABIEGOWI
3. **PRZYSTĄP** DO ZABIEGU MEZOTERAPII
4. **ZDEZYNFEKUJ** OBSZAR PODDANY KURACJI

KOLEJNY ZABIEG WYKONAJ PO 14 DNIACH.



● **VENOME HAIR FILLER 2.0**



ETAP II. VENOME HAIR FILLER 2.0

1. **ZA POMOCĄ IGŁY POBRANIOWEJ** POBIERZ PRODUKT VENOME HAIR FILLER 2.0 W ILOŚCI 3ML
2. **ZDEZYNFEKUJ** OBSZAR PODDAWANY ZABIEGOWI
3. **PRZYSTĄP** DO ZABIEGU MEZOTERAPII
4. **ZDEZYNFEKUJ** OBSZAR PODDANY KURACJI

W CELU UZYSKANIA PEŁNEGO EFEKTU ZABIEGOWEGO WYKONAJ 4-6 ZABIEGÓW W SERII, Z ZASTOSOWANIEM NAPRZEMIENNYM VENOME HAIR FILLER ORAZ VENOME HAIR FILLER 2.0.